

**Mascherina chirurgica “TNT 3 strati”**

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.  
Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani.  
Per indossarle correttamente:
  - ✓ Lavarsi le mani;
  - ✓ Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
  - ✓ Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;
  - ✓ Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la mascherina al viso;
  - ✓ Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.  
Per toglierle:
  - ✓ Lavarsi le mani
  - ✓ Sciogliere i lacci inferiori;
  - ✓ Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
  - ✓ Portare lentamente in avanti le mani;
  - ✓ Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno;
  - ✓ Lavarsi le mani
2. QUANDO UTILIZZARLA: da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da altre persone.
3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro come da indicazioni dell'OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro.